

neodisher® MediClean

Détergent liquide



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le lavage d'instruments chirurgicaux et dentaires, d'endoscopes, d'ustensiles d'anesthésie, de containers et d'autres ustensiles en laveurs-désinfecteurs.

Propriétés :

neodisher MediClean est un détergent faiblement alcalin. Peu moussant. Elimine les résidus de sang séché et dénaturé par les matières actives des désinfectants. Protège le matériel.

Utilisation et dosage :

neodisher MediClean est approprié à l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, le verre, les matières synthétiques courantes ainsi que les matériaux des ustensiles d'anesthésie. neodisher MediClean a une action de protection des instruments en acier anodisé naturel, pour cela utiliser de l'eau déminéralisée en phase de rinçage. Tester le matériel en aluminium anodisé avant utilisation. Procéder à la thermodésinfection à la fin du programme avec de l'eau déminéralisée. Pour une dureté d'eau >9°f l'installation d'un adoucisseur permet d'éviter l'entartrage de la machine et de réduire la consommation de détergent.

neodisher MediClean respecte l'environnement.
Pour le traitement des instruments en laveur-désinfecteur :
0,2 – 1 % (2 - 10 ml/l), à 40 - 60° C

Pour le traitement manuel des instruments :
0,5-2% en bain à ultrasons et en bain de trempage.
Renouveler la solution chaque jour.

Rincer abondamment avec de l'eau (si possible déminéralisée)
Ne pas mélanger avec d'autres produits.
Avant tout changement de produit rincer le système de dosage ainsi que les tuyaux à l'eau.

Données techniques :

Poids spécifique (20° C) : 1,1 g/cm³
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 45° C) 0,2 – 2,0 % : 8,5 – 9,5
Viscosité (concentré, 20° C) : < 50 mPas
Facteur de titrage : 0,8 (selon l'échelle de titrage spéciale neodisher MediClean)

Composants :

Selon la recommandation européenne :
< 5 % tensioactifs anioniques
5 – 15 % NTA (sel)
enzymes, agents de conservation

(Phenoxyethanol, methyl-, ethyl-, butyl-, propyl-, isopropylparaben)

Marquage CE :

neodisher MediClean est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

Stockage :

Au frais et à l'abri du gel. 2 ans dans les conditions de stockage indiquées.

Indications de risques et consignes de sécurité :

neodisher MediClean n'est pas un produit classé dangereux selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Bidon de 5 litres
Bidon de 10 litres
Bidon de 20 litres

FT 4043/2-2
08/05