

MediZym de Neodisher®

Agent nettoyant liquide au pH neutre pour laveurs-désinfecteurs

Principaux domaines d'application : Nettoyage mécanique des instruments chirurgicaux, du matériel d'anesthésie, des endoscopes flexibles, des contenants et autres ustensiles médicaux.

Caractéristiques : Le MediZym de Neodisher est un agent nettoyant au pH neutre qui contient des enzymes et d'autres adjuvants nettoyants. Il est particulièrement sans danger pour l'environnement. L'action du MediZym de Neodisher parvient à enlever les résidus de sang séché et dénaturé, tout en étant très douce sur le matériel.

L'acier inoxydable, l'acier des instruments, les métaux légers, le verre, les plastiques communs, ainsi que les matériaux des instruments d'anesthésie et des endoscopes flexibles résistent aux solutions de travail du MediZym de Neodisher.

Application et quantité : Nettoyage à la machine des instruments : de 0,2 % à 1 % (de 2 à 10 ml/l), à une température variant entre 40 et 50 °C

Nettoyage à la machine des endoscopes flexibles : 0,5 % (5 ml/l)

Nettoyage à la main : En immersion : de 0,5 % à 2 % pendant 20 à 30 minutes.

Par ultrasons : de 0,5 % à 2 % pendant 5 à 10 minutes.

Les solutions moins polluantes peuvent aussi être chauffées à un maximum de 45 °C.

La solution de travail du MediZym de Neodisher doit être changée chaque jour.

Par la suite, elle doit être complètement rincée. Ne pas la mélanger avec d'autres produits.

Destinée à un usage professionnel seulement.

Données techniques : Densité (20 °C) : 1,0 g/cm³

Intervalle de pH (définie en eau désionisée, 45 °C) de 0,2 % à 2 % : de 7,5 à 7,8

Viscosité (concentré, 20 °C) : <10 mPa/s

Ingrédients : Ingrédients conformes à la CE n° 648/2004 sur les détergents :

< 5 %, agents de surface anioniques

enzymes, agents de conservation

(Phénoxyéthanol, méthylparabène, éthylparabène, butylparabène,

propylparabène, isopropylparabène)

Marque CE :

MediZym de Neodisher respecte les exigences de la loi sur les appareils médicaux, conformément à la directive européenne 93/42/EC.

Information écologique : MediZym de Neodisher est composé de matières organiques facilement biodégradables.

Entreposage : Ranger dans un endroit frais sans givre. Le produit est utilisable pendant 2 ans s'il est entreposé selon les recommandations.

Avertissements de danger et conseils de sécurité : MediZym de Neodisher n'a pas à être classé conformément à la directive européenne sur les matières dangereuses 1999/45/EC.

Jeter seulement lorsque le contenant est vide et fermé. Pour la mise au rebut des résidus du produit, se reporter à la fiche signalétique.

Pour obtenir d'autres renseignements sur la sécurité, voir les fiches signalétiques CE. Celles-ci sont disponibles en ligne au www.drweigert.de sous la rubrique "Service".

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

Téléphone : (040) 78960-0

Télécopieur : (040) 78960-120

Courriel : info@drweigert.de

Site Web : www.drweigert.de

Les renseignements de cette fiche technique reposent sur nos connaissances actuelles. Ils décrivent notre produit à des fins de sécurité, mais ils ne concernent aucunement sa qualité ou ses propriétés présumées.