

neodisher[®] Mielclear

Liquide de rinçage



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le rinçage en machine des instruments dentaires, ustensiles et plateaux dans les cabinets et les cliniques dentaires.

Propriétés :

neodisher Mielclear mouille les surfaces en acier inoxydable et en matières synthétiques. Grâce à ses acides les résidus de produits alcalins et les eaux alcalines sont neutralisés.

Neodisher Mielclear est ajouté dans la dernière eau de rinçage

Utilisation et dosage :

0,2 – 0,4 ml/l au rinçage final en autolaveur dans le bac de dosage
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Données techniques :

Poids spécifique à 20° C : 1,05 g/cm³

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,2 – 0,4 ml/l : 4,1-3,5

Viscosité (concentrée, 20° C) : < 50 mPas

Composants :

Selon la recommandation européenne (89/542/CEE)

< 5 % tensioactifs non ioniques,

Marquage CE :

neodisher Mielclear est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

Stockage :

A l'abri du gel. 3 ans dans les conditions de stockage indiquées.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger C – corrosif

Ester d'acide phosphorique, liquide > 10 %

Indications de risques :

R 34 Provoque des brûlures.

Consignes de sécurité :

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer cette fiche technique).

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Flacon de 1 litre

FT 4119/2-1
03/03



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex

Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr

Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite..